

亲可视睡眠监测仪

使用指南

尊敬的用户，欢迎您选用本产品，在使用本品之前，请务必仔细阅读操作指南，并保存此操作指南以备后续参考。

免责声明：本产品不属于医疗器械，体征数据仅供参考，不可用于医学诊断。

1 外观介绍



1：睡眠监测主机； 2：信号线； 3：睡眠传感带； 4：指示灯


您可以通过下表检查睡眠监测仪是否工作正常：

状态灯	闪烁（WIFI 版本）	闪烁（GPRS 版本）
红灯闪烁	设备初始化，连接网络	设备初始化，连接网络
出现 1-2 次紫色灯 闪烁结束后熄灭	网络连接成功，开始正常工作	网络连接成功，开始正常工作
红灯持续慢闪烁（1s）	AP 连接异常（检查 SSID 密码设置）	网络信号弱，无法注册成功

红灯持续快速闪烁	无法连接 AP，设备进入小程序配网模式（可保持 6 分钟）	
----------	-------------------------------	--

2 设备安装

打开包装盒，将本品取出，使用信号线将传感器与主机相连（插入 S 口），同时将电源线插入主机电源口（插入 DC 口）。将睡眠传感带完全平铺在床垫下，传感带下方不能悬空，床垫厚度建议不要超过 35CM，传感带位置靠近用户心脏位置效果更佳，请避免睡眠时传感器不受力，如腿部或脖子对应位置处。信号线沿床沿走线，将睡眠监测主机平放于床头柜、地板等合适位置。

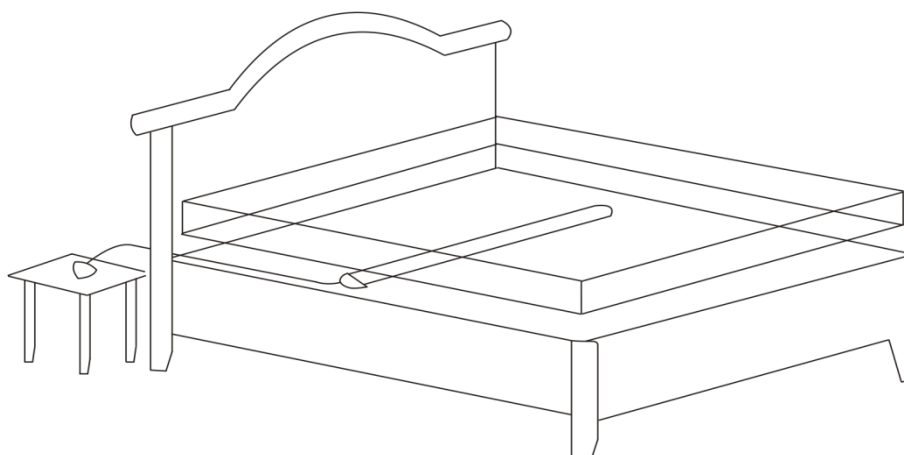

3 软件安装

打开手机微信、QQ 或任意浏览器，使用扫描功能，扫描包装盒内的二维码，下载并安装，根据提示完成注册。（若盒内无相应二维码，安卓用户在应用宝搜索“亲可视看护版”下载）。



(版本 2.0.3.4)

4 睡眠看护仪

1、扫描二维码添加设备

(1) WIFI 版 (注意不能使用 5GWiFi)

方法一：添加网关时配置 WiFi(蓝牙方式)

先将设备接通电源，再将手机连接 WIFI，在软件主界面，点击左上角的扫码框(或依次点击右上角“...” -> “扫码添加”)，当弹出二维码扫描页面，将手机对准设备底部的二维码，扫描后弹出设备添加页面。

<p>< 添加 睡眠监测仪 已添加</p> <p>设备名称 睡眠监测仪A0G00317</p> <p>设备S/N</p> <p>添加</p>	<p>< WIFI设置</p> <p>WIFI名称: yfoffice</p> <p>WIFI密码:</p> <p>设置</p>
---	---

点击“添加”，界面弹出是否配置 WIFI，点击“是”（IOS 系统需先手动打开蓝牙），在 WIFI 设置页面输入 WIFI 密码，点击“设置”。（设置 WIFI 时，请保持手机与设备处于 10 米范围内）



WiFi 设置成功后，在绑定关心的人界面选择用户即可，此时设备添加成功。


若添加时界面弹出是否配置 WiFi，选择了“否”，那么可通过以下步骤找到配置页面

在 app 主页点击右上角的 “...” ,选择已添加设备-->在睡眠检测仪栏找到刚刚添加的网关并点击-->选择设置按钮-->选择配置设备参数-->输入 wifi 密码并点击设置。

方法二：使用小程序配置 wifi（推荐使用）

若在进入配置 WiFi 页面一直是加载的状态，并提示未获取到该蓝牙设备服务。那可以采用小程序配置的方法。

步骤为：先将网关上电，然后打开微信扫一扫，扫描下方二维码，点击开始配置，此时需观察睡眠监测仪指示灯的状态；当指示灯快速闪烁红灯时，表示进入配网模式，此时输入 WiFi 密码，点击连接；等待约 30S 左右，页面提示“配置成功！”

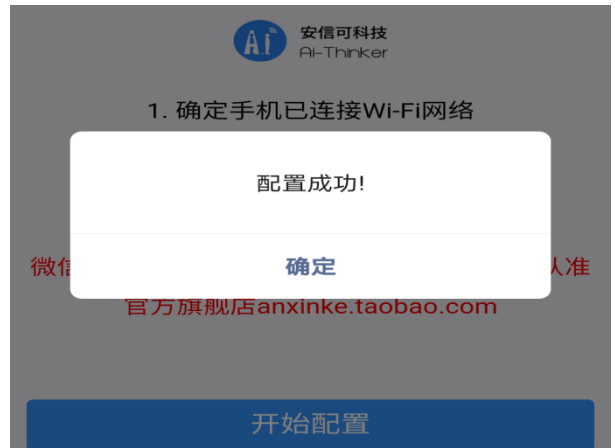

此时返回手机 APP，查看睡眠仪状态（配置成功，则显示在线），若显示离线，刷新状态，等待约 1 分钟左右。仍显示离线，则重复小程序配置步骤。此时留意一下设备的闪灯情况，当点击连接后，设备闪灯情况是会闪 5 次紫灯（表示配网成功），然后设备重启（闪一下蓝灯，红灯慢闪，当观察到设备闪了 1-2 下的紫灯，然后灯不再闪烁，表示设备已上线）



(2) GPRS 版 (设备 ID 号为 A1GXXXXX, 上电后 30s 左右设备会上线)

将设备接通电源，在软件主界面，点击左上角的扫码框(或依次点击右上角“...”->“扫码添加”)，当弹出二维码扫描页面，将手机对准设备底部的二维码，扫描后弹出设备添加页面。

添加成功后，绑定关心的人，设备上线使用。

2、配置消息提醒以及各设备的报警开关

在“软件主页面”，点击“用户的头像”，切换到“推送配置”，可根据需求设置提醒消息，当睡眠主机监测到事件异常时，手机端即可收到消息提醒信息；向上滑动可看到“呼叫消息推送配置”，打开可配置相应的报警器开关(开关按钮显示灰色，代表该关心人未添加此类型设备；另外门磁和活动探测的开关，默认是关闭状态)




5 呼叫设备

1、手动添加呼叫器(烟感,燃气,漏水等)

点击 app 主页右上角的 "...", 选择 "手动添加", 选中 "呼叫器", 输入 "呼叫器 ID" -> 点击 "添加" 即可。如图所示：



点击 "添加" 后-->在绑定网关页面选择绑定的网关-->选择要绑定的人。

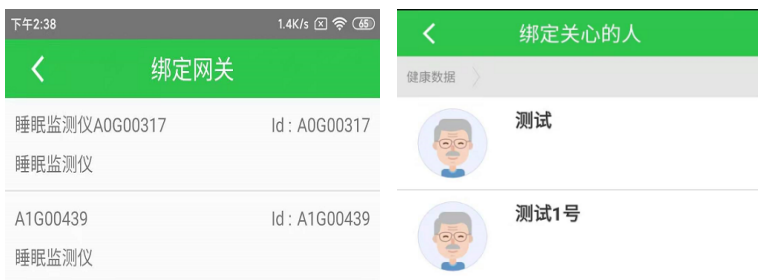

6 健康设备

1 添加血压仪

点击 app 主页右上角的 “...” ->选择 “手动添加” ->在健康护理设备栏选择 “血压仪” ->选择 “自动搜索” ->找到 Yuwell BP 开头 (或以 BP 开头) 的设备->点击下一步->点击添加.



2 添加体温枪

点击 app 主页右上角的 “...” , 选择 “手动添加” ,在健康护理设备栏选择 “体温枪” ,选择 “自动搜索” ->找到 AOJ 开头的设备->点击下一步->点击添加.



7 睡眠监测仪功能说明

1、实时监测

当设备成功绑定后，点击首页睡眠数据或关心的人，弹出睡眠监测仪的统计页面，点击实时监测，即进入到实时数据监测页面。



2、睡眠报告

点击或滑动到日报、周报和月报，即可查询不同时间段的睡眠报告。



3、设备升级

点击“主页左下角的设置” -> 选择“帮助” -> “睡眠固件更新”，如有新版本发布，用户点击升级固件即可（升级时请勿断电）。





固件更新



睡眠监测仪A0G00888

设备ID: A0G00888

当前版本: c.ab

更新版本: c.an

可以更新



8 常见问题解答

1 设备蓝牙搜索不到？

请检测手机蓝牙功能是否开启，且距离建议保持在 3 米范围内。

2 手机 APP 看不到实时数据？

先检测设备是否接通电源，再检测网络是否连接成功，用手机连接上 WIFI (暂不支持 5G-WIFI)，在添加睡眠监测仪页面，输入正确的 WIFI 名称与密码，设置成功后，重启设备。

3 关心的人提示未绑定睡眠监测仪？

请进入“主页”->“设置”->“设备管理”->“睡眠监测仪”，点击齿形图标，绑定关心的人即可。

4 未检测到睡眠波形？

请检测睡眠监测仪信号线是否连接成功 (插入 S 口)，同时检测信号线是否正常，有无破损、接触不良情况。

5 未接收到报警信息？

请检测睡眠监测仪报警设置是否打开，同时报警布防时段是否与报警时间匹配。并检测当前用户是否绑定睡眠监测仪。

6 床上无人时，设备检测为有人状态？

请检查床周边环境有无持续的震动干扰，并检查电源插座附近有无持续的电信号干扰，如大功率吹风机，电力猫等。

7 WiFi 版设备上电一直闪红灯

请检查网络环境是否正常，一直闪红灯表示没连上网络

9 规格参数

产品名称	亲可视睡眠监测仪
产品组成	睡眠监测仪主机+睡眠监测仪传感器
传感器	高灵敏度压电薄膜
通信方式	支持有线版（结构定制）、WIFI 版、蓝牙版、GPRS 版
健康管理	可检测静息时的心率、呼吸频率、睡眠质量统计。（数据不做临床医学诊断）
行为管理	内部双通道检测，可检测上床、离床、翻身、体动等睡眠行为。
消息类型	上床、离床、离床未归、体动，翻身、心率和呼吸率数据消息。
统计报表	睡眠时间与状态统计、睡眠质量与安全统计以及改善建议。
供电方式	DC 5V 1A 电源，无电池设计，免维护。
信号线规格	3.5mm 音频接头，长 2m，带屏蔽信号线
第三方对接	支持

产品尺寸	主机：94*92*23mm
	传感器头：60*70*8mm；传感器带：78.5*56*2mm
包装尺寸	280*175*88mm
整机重量	500g（包括包装）